

KoNcem Zirconium

Instrukcja stosowania

Chemoutwardzalny cement na bazie materiałów złożonych o neutralnym kolorze, do stosowania zarówno w laboratorium jak i gabinecie

CE 0297

KoNcem Zirconium

Instrukcja stosowania

Opis materiału

KoNcem Zirconium jest chemoutwardzalnym cementem na bazie materiałów złożonych o neutralnym kolorze, do stosowania zarówno w laboratorium jak i gabinecie.

Wskazania

Adhezyjne osadzanie uzupełnień protetycznych z tlenku cyrkonu na prace z tlenku cyrkonu, tytanu, metali szlachetnych i nieszlachetnych oraz z materiałów ceramicznych.

Przeciwwskazania

Materiału KoNcem Zirconium nie należy stosować u pacjentów o znanej nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występują bardzo rzadko, jeżeli materiał jest stosowany prawidłowo.

Sposób postępowania

Ważna uwaga! Powierzchnia przed cementowaniem powinna być absolutnie czysta, sucha i odtłuszczona.

Powierzchnię metalu należy wypiąskować tlenkiem aluminium (50 µm) pod kątem 45° pod ciśnieniem nie wyższym niż 2 bary. Następnie powierzchnię należy oczyścić parą wodną lub mieszaniną izopropanolu i acetonu. Powierzchni metalu wysuszyć łagodnym strumieniem powietrza bez wody i oleju. Po oczyszczeniu powierzchni metalu należy nałożyć równomierną warstwę materiału KoNmetal P. Pozostawić do wysuszenia przez około minutę. W przypadku, gdy jest to konieczne, można nałożyć drugą warstwę materiału KoNmetal P. Następnie nałożyć na podwójną strzykawkę końcówkę mieszającą. Pierwszą porcję wyciśniętą z strzykawki należy odrzucić. Następnie nałożyć cement KoNcem Zirconium na obydwie powierzchnie przeznaczone do cementowania. Połączyć obydwie powierzchnie, a nadmiar cementu usunąć.

Czas pracy z cementem: 3-4 minuty.

Po zakończeniu cementowania strzykawkę należy natychmiast zamknąć za pomocą specjalnie dopasowanej zatyczki.

W celu uzyskania perfekcyjnej adhezji należy pozostawić zacementowane powierzchnie na 30 minut.

Warunki przechowywania

- Materiału KoNcem Zirconium nie należy stosować po upływie daty ważności
- Materiał należy przechowywać w chłodnym miejscu. Zalecana temperatura przechowywania to od 2°C do 10°C.

- Strzykawki z podwójnym tłokiem z materiałem KoNcem Zirconium oraz butelkę z płynem KoNmetal P należy zamykać bezpośrednio po użyciu.
- Data ważności podana jest na strzykawkach KoNcem Zirconium i na butelce KoNmetal P.

Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Materiał przeznaczony tylko do użytku w stomatologii

Producent

**GDF GmbH
Dieselstraße 5-6
61191 Rosbach/Niemcy**

Instytucja certyfikująca

DQS Medizinprodukte GmbH

Dystrybutor

**Firma Handlowo-Edukacyjna
„KodeNt“
ul. Dzika 19/23 m. 68
00-172 Warszawa**

Materiał jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy jego stosowaniu należy ściśle przestrzegać instrukcji użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania niezgodnie z podanymi w instrukcji wskazaniem. Użytkownik odpowiada za testowanie produktu dla swoich własnych celów i za jego użycie w każdym innym przypadku nie wyszczególnionym w instrukcji. Opis produktu i jego skład nie stanowią gwarancji i nie są wiążące.